


「動き」を測る。未来が動く。

**MicroStone**<sup>®</sup>

## 体幹2点歩行動揺計「THE WALKING<sup>®</sup>」シリーズ 転倒リスク評価システム 型番：MVP-WS2-FRセット

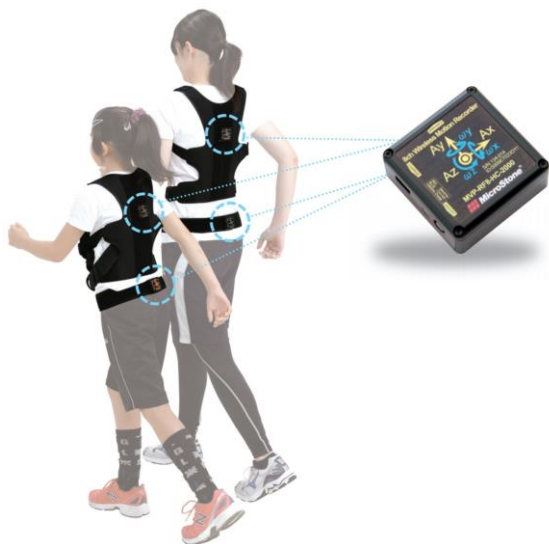

- ① 装着から解析結果表示まで約2分！  
簡単に計測できる歩行計測装置です。
- ② AIによる転倒リスク分析で、  
転倒リスクを点数化！  
さらに「注意すべき転倒タイプ」も  
表示します！
- ③ 企業の労働安全衛生部門や  
総務部門にて、転倒労災低減や  
健康維持増進活動の目玉に！

詳しい情報はWebサイトにて

MVP-WS2-FR

検索




● STEP1 計測器を装着します



専用ベルトを利用して、  
小型無線センサを  
①胸椎付近  
②仙骨付近  
2か所に装着します。



● STEP2 10mほど普段通りの歩行をしてもらいます

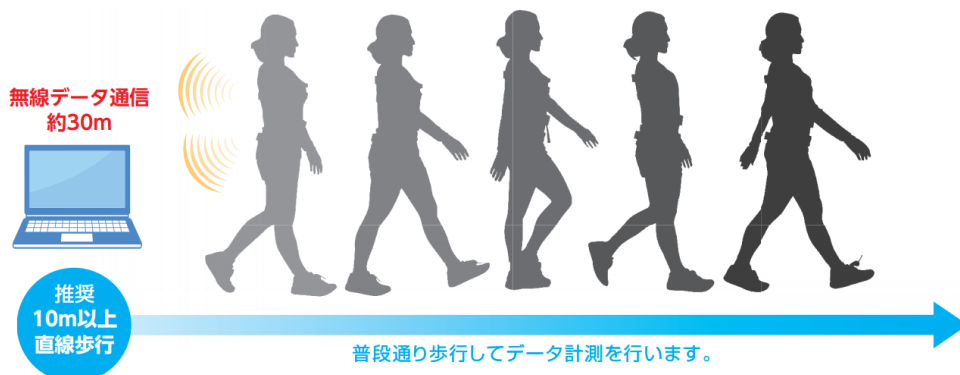

● STEP3 計測結果が瞬時に表示されます



転倒リスクを瞬時に「点数化」します

5回分の計測結果を合わせて表示します

どのような転倒をしやすいかを表示し、注意喚起します。

参考の体操例を動画で確認できます。

● 商品構成

種別	品名	型番	主な特徴他
ソフトウェア	体幹2点歩行動揺計 転倒リスク評価版ソフトウェア	MVP-WS2-S-FR	対応OS : Windows7(64bit) 、 8、 10 PC 1台につき1ライセンス。
計測器本体セット	8チャンネル小型無線 モーションレコーダ	MVP-RF8-HCセット	内容物 : 本体 MVP-RF8-HC/付属ソフトウェア MVP-RF8-S 充電用ACアダプタ/USBケーブル/スタートアップガイドス/検査成績書
PC側受信器	Bluetooth-USBアダプタ	Parani-UD100	通信規格 : Bluetooth Class1 最大通信距離約30m
取付ベルト他	MVP-RF8 胸部用ベルト	MVP-RF8-CBL	本体をマジックテープで固定できる伸縮ベルト。2か所で胸部に簡単に装着可。
	MVP-RF8 仙骨用ベルト	MVP-RF8-SBL	本体をマジックテープで固定できる伸縮ベルト。幅約5cm・長さ100cm
	MVP-WS2 専用アルミケース	MVP-WS2-ALC	約46×33×14cmのアルミケース(取手部除く)。構成品を全て収納可。

**MicroStone®** マイクロストーン株式会社

〒385-0007 長野県佐久市新子田1934  
TEL : 0267-66-0388 FAX : 0267-66-0355  
E-mail : info@microstone.co.jp

Web : <http://www.microstone.co.jp>